

COMO ELEGIR EL TAMAÑO

BTM Clip Plus

BTM Clip Plus fue diseñado para controlar una leve a moderada incontinencia urinaria, resultando en una solución cómoda y fácil de ocultar. Nuestro producto no impide el flujo de sangre.

Cómo elegir el tamaño de BTM Clip Plus

BTM Clip Plus viene en tres tamaños.

Siga estas instrucciones para determinar el tamaño que es adecuado para usted:

1. Utilice una cinta métrica flexible (tipo huincha de medir usada en el área textil).
2. Realice la medición con el pene en flacidez (**NO ERECTO**). Su cuerpo debe estar a temperatura ambiente y **NO** realice esta medida inmediatamente después de una ducha.
3. Envuelva la cinta métrica alrededor de su pene (diámetro), a 3 o 5 centímetros del cuerpo (desde la base del base, **NO** mida la longitud.)
4. Cuando la cinta de medición esté ajustada alrededor de su pene, obtenga la medida en centímetros. Durante la medición, **NO** debe ajustar en exceso la cinta métrica.
5. Utilice la medida en centímetros para determinar el tamaño antes de comprar:
 - Pequeño:** menos de 6 cm de diámetro.
 - Regular:** de 6 a 10 cm de diámetro.
 - Grande:** de 10 a 14 cm de diámetro.