

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BTM Clip Plus

BTM Clip Plus fue diseñado para controlar una leve a moderada incontinencia urinaria, resultando en una solución cómoda y fácil de ocultar. Nuestro producto no impide el flujo de sangre.

BTM Clip Plus le ofrece los siguientes beneficios:


1. COMODIDAD: diseño contorneado de tipo cuna con la banda elástica que minimiza la presión excesiva, mediante la distribución de la fuerza radial de manera uniforme alrededor del pene y centrando las fuerzas oclusivas uretrales donde es necesario. Los materiales cuidadosamente elegidos también mejoran la comodidad, con una suave espuma envuelta en plástico flexible.

2. CREDIBILIDAD: Es compacto y es fácil de ocultar. La banda elástica fija el dispositivo en su correcta posición, lo que permite llevar su rutina diaria sin preocuparse por **BTM Clip Plus**. La higiene adecuada peneana no debe ser una preocupación tampoco. **BTM Clip Plus** tiene un precio razonable, lo que permite reemplazar el dispositivo a intervalos regulares (se recomienda cambiarlo cada 10 a 20 días considerando un desgaste natural por uso diario y/o intensivo).

3. SEGURIDAD: Cuando se coloca el **BTM Clip Plus** en el pene, la oclusión uretral con su almohadilla protectora presiona sobre la uretra, esta presión localizada evita la pérdida involuntaria de orina, el flujo de sangre no es obstruido, garantizando su seguridad.

Cómo usar BTM Clip Plus

El pene se coloca a través de la abertura que tiene el **BTM Clip Plus**. El segmento inferior debe colocarse de manera que la almohadilla de oclusión uretral esté en contacto con la uretra, y a continuación se fija el dispositivo envolviendo la banda elástica ajustándola cómodamente alrededor del pene.

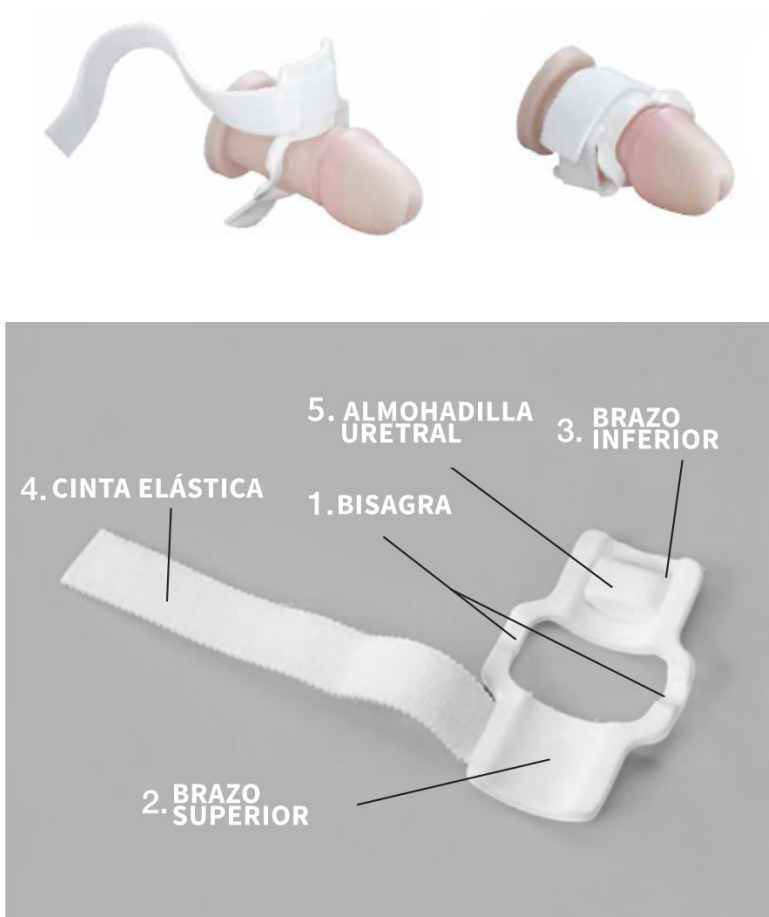

Información importante: Recuerde orinar de forma regular cuando utilice el **BTM Clip Plus**. Debe vaciar su vejiga al menos una vez cada 4 horas. Antes de orinar, asegúrese de soltar la banda elástica con velcro y ambos brazos.

No use el **BTM Clip Plus** si tiene un catéter urinario o un implante de prótesis peneana.

Preguntas Frecuentes

Dado que el BTM Clip Plus está disponible sin un prescripción, ¿Debería consultar a un médico?

Sí, es una buena idea. La pérdida de orina es un síntoma - no es una enfermedad en sí, por lo que debe consultar a su médico para averiguar la causa de este problema.

¿Existe un tamaño estándar de BTM Clip Plus para todos los hombres ?

No. Hay tres tamaños disponibles. El tamaño regular (talla M) se ajusta a la mayoría de los hombres.

¿ BTM Clip Plus restringe el flujo sanguíneo en el pene?

No. El diseño especial de **BTM Clip Plus** permite detener sólo el flujo de orina.

¿Cuánto dura cada dispositivo BTM Clip Plus?

No utilice un dispositivo durante más de 10 a 20 días. Después de ese periodo, su estructura comienza a debilitarse y no funcionará tan eficazmente. Con un cuidadoso uso y mantención puede prolongar la vida útil del producto: no humedecerlo o forzarlo excesivamente.

¿Puedo lavar el BTM Clip Plus?

No. Si lo lava, el **BTM Clip Plus** puede perder eficacia. Debe reemplazar el dispositivo cuando se moje o dañe y pierda su funcionalidad.